

Kurzanleitung: Richtiges Blutzuckermessen mit dem STADA GLUCO RESULT®

Russisch



Тест на уровень сахара в крови STADA GLUCO RESULT® – Последовательность действий



1

Промойте руки тёплой водой с мылом.



2

Выньте одну тест-полоску из контейнера и сразу закройте контейнер. Введите тест-полоску в тестовое отверстие так, чтобы контакты (металлические блоки) указывали вверх. Глюкометр включается.



3

Уколите кончик пальца.



4

Дождитесь появления капли крови. Прижимайте кончик введённой в прибор тест-полоски к капле крови, пока прибор не издаст звуковой сигнал и на дисплее не появятся штрихи.



5

Через несколько секунд отображается результат измерения с датой и временем.



6

Держите глюкометр вертикально так, чтобы тест-полоска указывала вниз. Нажмите на кнопку выброса на приборе, чтобы удалить тест-полоску.



Данная инструкция содержит краткий обзор порядка измерения уровня глюкозы в крови. Указания по настройке глюкометра и установке даты и времени приведены в разделе „Первые шаги“ руководства пользователя. Подробную информацию о полной последовательности измерения уровня глюкозы в крови см. раздел „Тест на уровень сахара в крови“ в руководстве пользователя. Для получения помощи по вопросам использования глюкометра обращайтесь по телефону 06181/603-9000.

STADA
Diagnostik  **DIABETES**